

# 新型飞翔

## 碳纤储能脚

人人能够感到的舒适



宝泰欧

PROTEOR

# 新型飞翔

## 碳纤储能脚

新型飞翔碳纤储能脚其设计理念为**弹性和舒适**，在日常生活中充满**自信**。

这款脚板专门为中等活动水平截肢者而设计，**新型飞翔**让日常行走更**安全、更省力**。


125 kg/275 Lbs

4

3

2

1

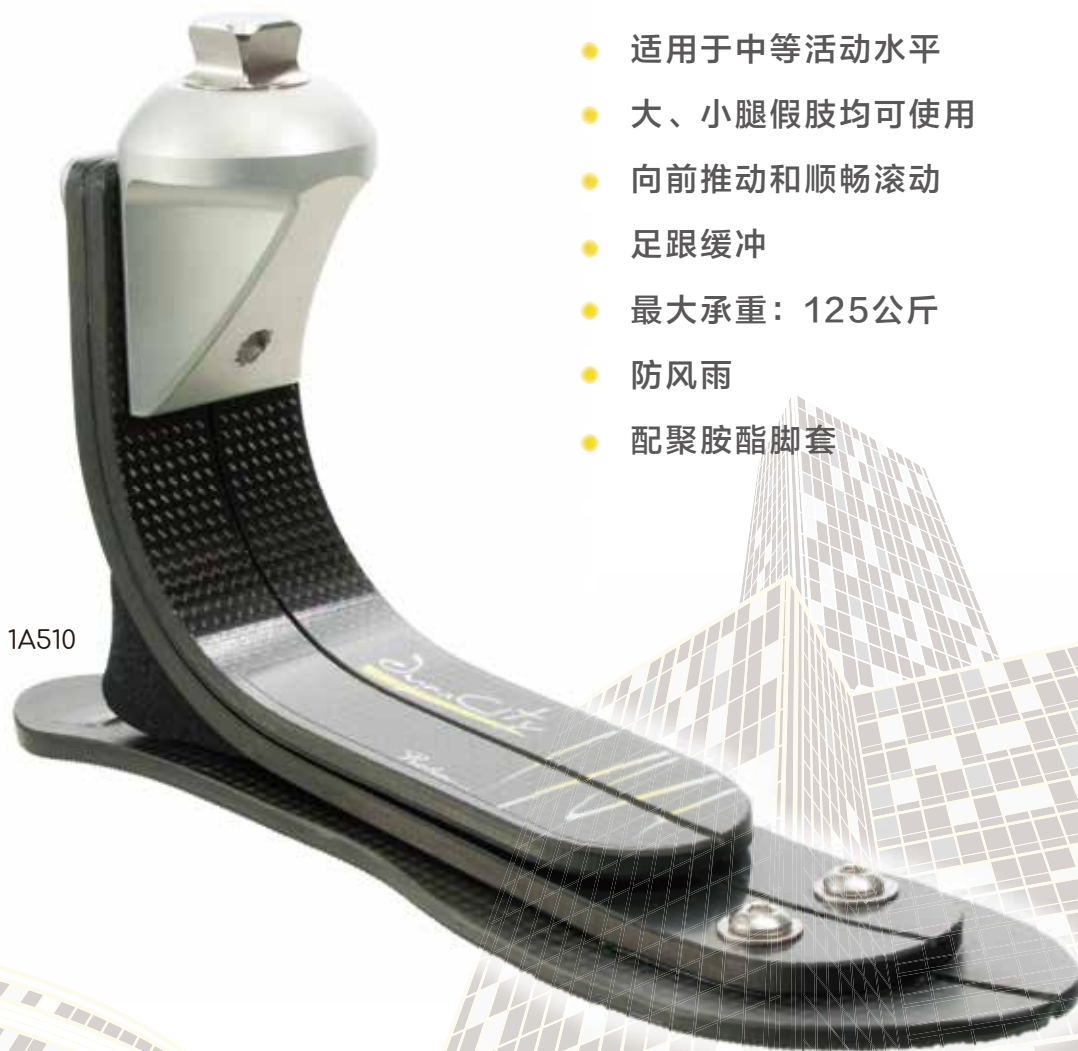

1A510

- 适用于中等活动水平
- 大、小腿假肢均可使用
- 向前推动和顺畅滚动
- 足跟缓冲
- 最大承重：125公斤
- 防风雨
- 配聚胺酯脚套

## 三层分叉碳板

三层依次叠加分叉碳板，重现人体自然的内/外翻运动，从而最大限度地依随坡路或崎岖不平的路面。

这一“真实”滚动功能带来巨大的舒适感。

三层复合碳纤板（碳纤/环氧树脂）结构使用弹性增加。

- 最下层碳纤板为脚板总长度，具有良好支撑性和顺畅、持续的步态。
- 中间层碳纤板起到让脚板迅速放平的作用。
- 最上层碳纤板产生推进步幅前行所需要的能量释放。

# 新型飞翔

## 碳纤储能脚

人人能够感到的舒适

能量存储和释放

脚掌


稳定性：  
向前推进和平缓滚动

# 新型飞翔

## 碳纤储能脚

产品型号	硬度	左/右	尺寸(厘米)	整体高度(厘米)	结构高度(厘米)
1A510*	1-5级	G/D	20-30	149	130

型号示范: 硬度级、右侧、25号 = 1A510-1D25  
 25号脚板重量约: 445克(不含脚套)  
 G=左/D=右

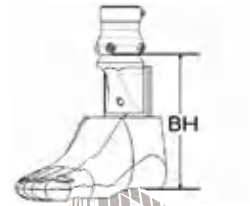


根据截肢者体重和活动水平选择脚板硬度					
尺寸	45 - 59 公斤	60 - 74 公斤	75 - 90 公斤	91 - 107 公斤	108 - 125 公斤
22	1	1	2	2	无
23	1	1	2	2	
24	1	1	2	2	
25	2	2	3	3	4
26	2	2	3	3	4
27	2	3	3	4	4
28	2	3	3	4	4
29	4	4	4	5	5
30	4	4	4	5	5


脚板跟高为10毫米  
 带与标准连接件相连接的阳四棱台  
 跟高可调范围: 0 - 20毫米

脚板套信息			
产品型号	左/右	型号	颜色
1A60020-*	-G/-D	20-30	肤色

型号示范: 右侧、25号、肤色 = 1A60020-D25  
 G=左/D=右

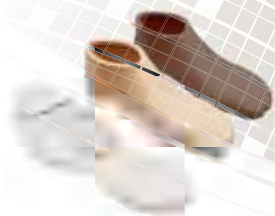

脚板包含踝罩和玻纤保护袜

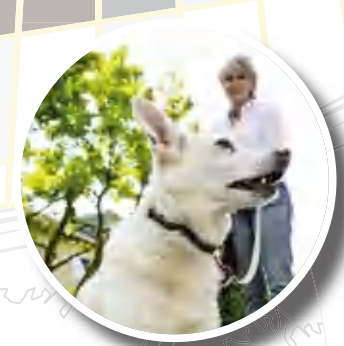

更多的信息与视频在  
[www.proteor.com.cn](http://www.proteor.com.cn)

宝泰欧(北京)假肢矫形器商业有限责任公司  
 地址: 北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层  
 电话: 010-5203 7101  
 传真: 010-5203 7102  
 网址: [www.proteor.com.cn](http://www.proteor.com.cn)