

是什么使超跃Plié 3智能防水膝关节成为任何活动水平截肢者的理想选择？


- 快速响应，适应各种步态速度和患者不同步速的变化，反应灵敏，具有跌倒保护功能。
- 重量小于市面上常见的同类智能仿生膝关节，仅1235克。
- 产品重心更接近人体近端，使用时感觉更轻便。
- 可安全地支持用户向前后左右方向行走、小步行走以及在狭小空间内转身行走。
- 既为高活动水平患者提供了响应能力，又为低活动水平患者提供了稳定性。
- 至今已改进到第三代，具有更坚固，更快速和可防水的特点。





丹尼斯，43岁，儿科护士
我对福瑞达产品的欣赏是它能使我达到自然的步态，Plié3关节和液压仿生踝组合给了我有史以来最自然的步态。在截肢的25年里，我第一次和孩子们一起滑水，做运动。因此，我不再是一个旁观者，而是真的能够和我的孩子一起参与和享受乐趣。



杰克，71岁，律师，教授
我喜欢Plié3关节。无论我在做什么，它都100%地支持我。无论我是在课堂上讲课，还是和我的妻子散步，还是在公园里陪我的孙子玩耍，我从来感觉不到我在使用假肢，我有信心Plié3关节可以帮助我实现所有的日常活动。

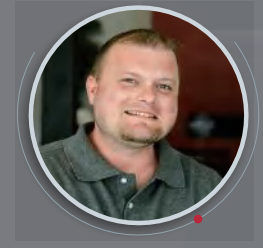

乔希，35岁，篮球教练
我在四岁的时候就截肢了，三年前我装配Plié3之前，我用过好几个品牌的膝关节，我住在寒冷、多冰雪的地方，Plié3的防摔倒功能已经无数次地帮助了我。我是篮球教练，而Plié3能够跟上我的步伐，我不需要任何模式，也不必过多考虑我的假肢，因为它可以识别我的活动，并作出反应。

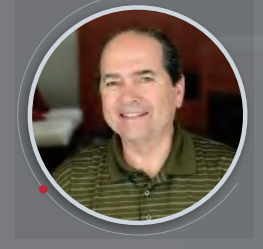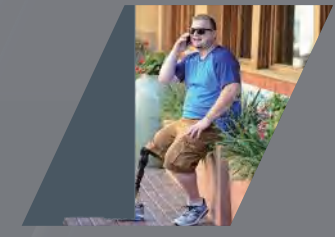

罗伯特，69岁，退休工程师
在装配Plié3之前，我跪倒过很多次，经历了无数次跌倒和重新站起来。但自从我有福瑞达Plié3，我从来没有摔倒过，当我觉得我要绊倒时，它的防摔倒功能就牢牢支持住了我的身体。




关注并解决截肢者的困难

Plié 3 关节的每次创新都旨在和患者、医生以及假肢技师共同合作，开发出优秀的假肢产品。这些创新和解决方案包括技术创新、服务、培训、教育资源和咨询支持，共同来确保用户的满意。

技术参数

- 最大屈曲角度：**大腿款：125°
长残肢及膝离断款117°
- 结构高度：**大腿款：235毫米
长残肢及膝离断款：223毫米
- 最大承重：**中度活动水平：125公斤
高活动水平：100公斤
- 产品重量：**1235克
- 电池寿命：**超过24小时（取决于个人活动水平）
- 耐水性：**IP67，既可防尘，也可在1米深的淡水中浸没最多30分钟

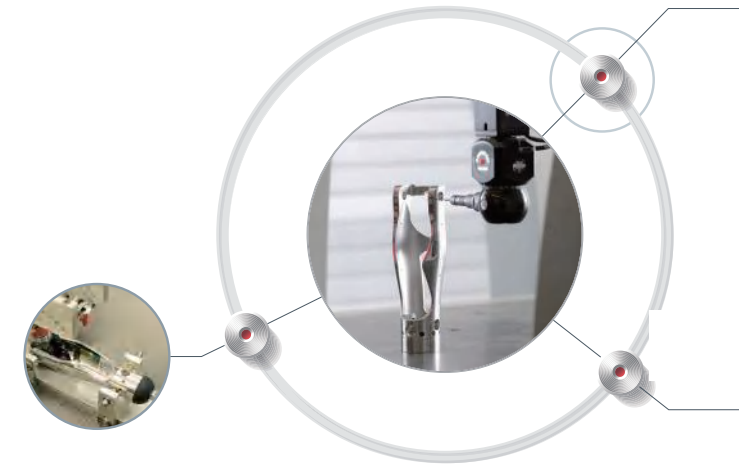

保修和服务

- Plié 3膝关节质量保修期为36个月，
- 保修期内的维修和服务是免费提供的。
- 当超过保修期后，返厂进行修理，每个膝关节都会由我们的技术人员评估，并建议进行修理或更换。
- 患者可以购买最长五年的保修期，但需要额外付费。延长保修期必须在装配后12个月内购买。
- 请与宝泰欧客服或您的区域销售经理联系，了解保修和服务问题。

»» 与我们联系

宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司
地址：北京市朝阳区管庄1号北岛写字楼1层
电话：010 6547 6760
传真：010 6547 6769
网址：www.proteor.com.cn




重新发现 Plié3的多功能性



Plié 3 膝关节拥有更先进的结构和微处理器，具有更坚固，更快速和可防水的特点

Plié 3膝关节可以快速响应各种步态速度和步速的变化。反应非常迅速，可以安全的支持使用者向前后左右方向行走，小步行走以及在狭窄空间内转身行走。

Plié 3提供了一个更自然步态周期，尤其是从支撑期到摆动期的过渡，阻尼是基于摆动屈曲，而不是靠患者踢腿速度和力量。这种仿生性设计，可以有效减少患者残肢的压力，结合流畅，直观的结构设计和功能，Plié3膝关节可以使假肢装配技师更容易帮助病人实现他们获得更高运动能力的梦想。

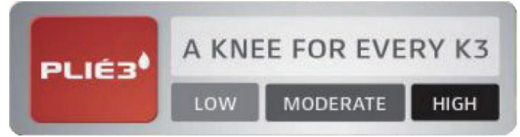


一款适合
高活动水平截肢者的
理想膝关节

主要特点	Pilé 3 关节
微处理器控制响应时间	10毫秒
质量轻	1235克
跌倒保护功能	✓
无级变速（包括：慢、中、慢跑、跑步）	✓
完全潜水	✓
能够适应所有的活动	✓
可充电电池	✓
可与任何脚板适配	✓
与制造商的远程沟通	✓
可以选择不同颜色的外保护壳	✓
美国制造	✓



Plié 3拥有更坚固的内部组件，旨在提高耐用性。

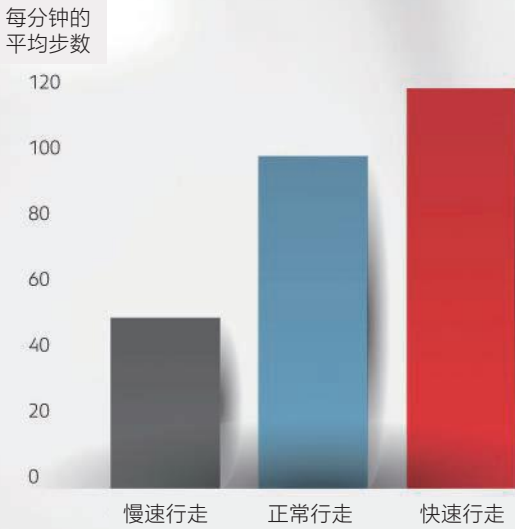

基于Plié 3 膝关节市场上超过六年的临床装配分析，该关节具有可靠的步态适应能力和步速适应能力

简化了电池盖结构

配2块可充电电池，方便使用

提高了屈曲保护挡板材料的耐用性

专有传感器和负载传感器实现跌倒保护功能



防水电池盖

标记了膝关节轴心的位置便于对线（前后0-5mm）

8MHz微处理器在10毫秒内响应

快速响应阀

通过IP67测试的防水材料

新的结构和电子元件，实现更平稳的步态

11 11种颜色以上的保护壳可选



防水涂层使患者安心享受户外活动。既可防尘，也可在1米深的淡水中浸没最多30分钟。

目标用户

K3

- 适应活动水平从低到高的任何患者；
- 受益于先进的跌倒保护功能，低活动水平患者可以放心的行走；
- 受益于微处理器的快速响应，高活动水平的患者能够享受从步行到跑步的各种活动。